



Abbott

AMÉLIORER L'ACCÈS AUX SOINS ET ACCÉLÉRER LA PRISE DE DÉCISIONS CLINIQUES

TESTS DIAGNOSTIQUES PORTATIFS ET PRÉCIS AVEC LE SYSTÈME i-STAT 1




i-STAT[®]

RÉSERVÉ À UN USAGE DIAGNOSTIQUE IN VITRO



DE NOUVEAUX MODÈLES DE SOINS APPARAISSENT POUR AIDER LES FOURNISSEURS À RELEVER LE DÉFI DE L'ACCÈS AUX SOINS

Les organismes de santé continuent d'être mis au défi de fournir des soins de santé de qualité en raison de la demande accrue de soins, de l'escalade des coûts et des contraintes financières. Pour répondre à ces demandes tout en offrant des soins de qualité, de nombreux organismes de santé ont décentralisé la prestation des soins vers des structures périphériques afin de favoriser une utilisation plus appropriée des ressources et de servir le plus grand nombre possible de patients.

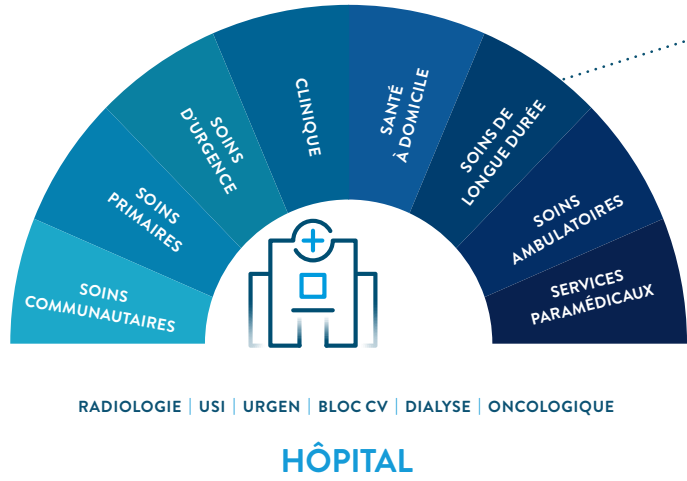


POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE, LES SOINS S'ÉTENDENT À L'EXTÉRIEUR DE L'HÔPITAL

Les tests portatifs effectués au point d'intervention fournissent des renseignements diagnostiques rapides et précis partout où les soins sont prodigués. Le système *i-STAT* est une solution fiable de test au point d'intervention qui vient compléter ces nouveaux modèles de soins.

TRANSFORMER LES DONNÉES EN DÉCISIONS AVEC LE SYSTÈME i-STAT ET LE GESTIONNAIRE INFO HQ

Les options de connectivité filaire et sans fil d'*i-STAT* fonctionnent avec *Info HQ*, un gestionnaire de données web avancé conçu pour offrir simplicité, connectivité et contrôle. Gérer efficacement le transfert des données des patients, des opérateurs et des logiciels vers les instruments, ainsi que les résultats des tests vers le DME ou le gestionnaire de données pour une gestion rationalisée des données.


LES INSTRUMENTS i-STAT ENVOIENT ET REÇOIVENT DES DONNÉES VIA VOTRE RÉSEAU*

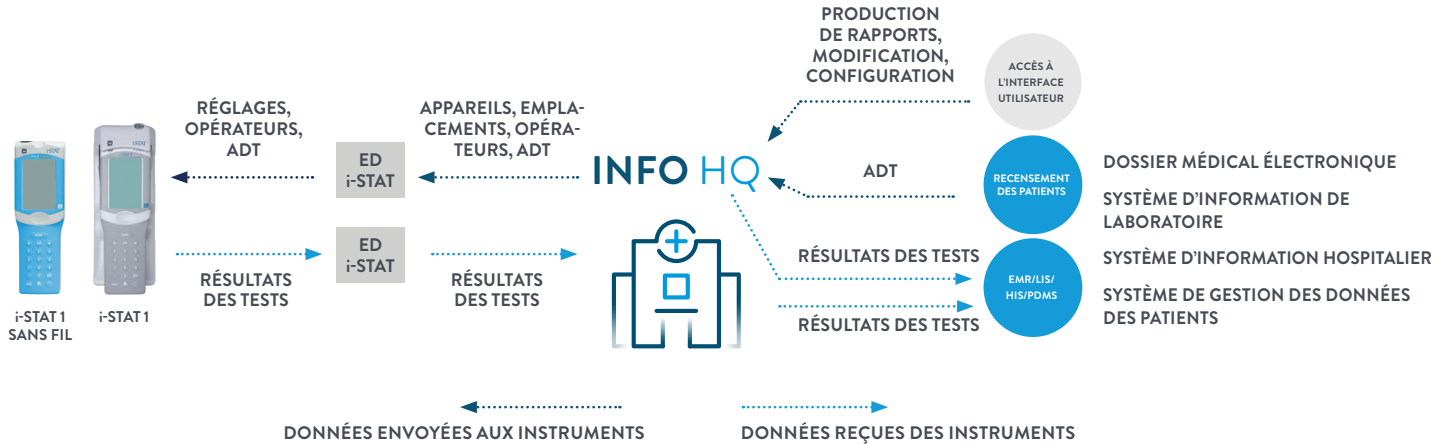

INFO HQ | UN GESTIONNAIRE DE DONNÉES WEB AVANCÉ SIMPLIFIER LA GESTION DES DONNÉES i-STAT


Dites NON aux processus papier inefficaces et OUI au contrôle informatisé. Info HQ offre une gestion puissante de l'ensemble de votre programme de tests *i-STAT* avec des options d'intégration adaptées à vos besoins.

Le système *i-STAT* prend en charge les options de connectivité là où les soins aux patients sont nécessaires. Utilisez le système *i-STAT* près du patient et envoyez les résultats en temps réel au système d'information hospitalier afin de répondre aux exigences du secteur préhospitalier, comme la télémédecine ou d'autres unités médicales mobiles.

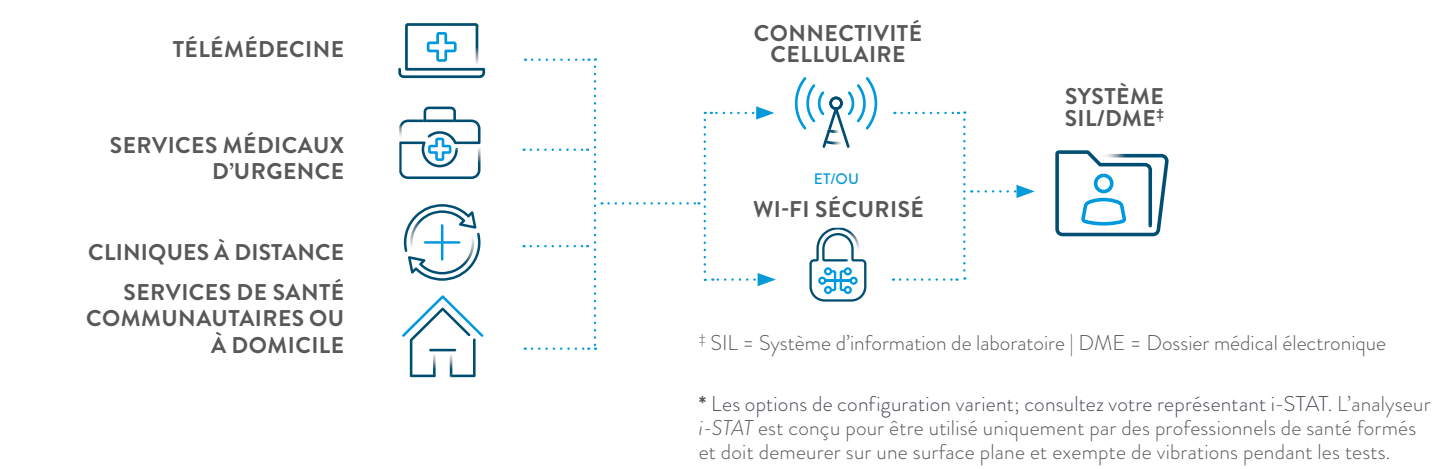


UN VASTE MENU DE TESTS COMPLET | ÉLIMINE LA NÉCESSITÉ D'UTILISER PLUSIEURS INSTRUMENTS D'ANALYSE

LARGE GAMME DE CARTOUCHES POUR DE NOMBREUX MILIEUX CLINIQUES

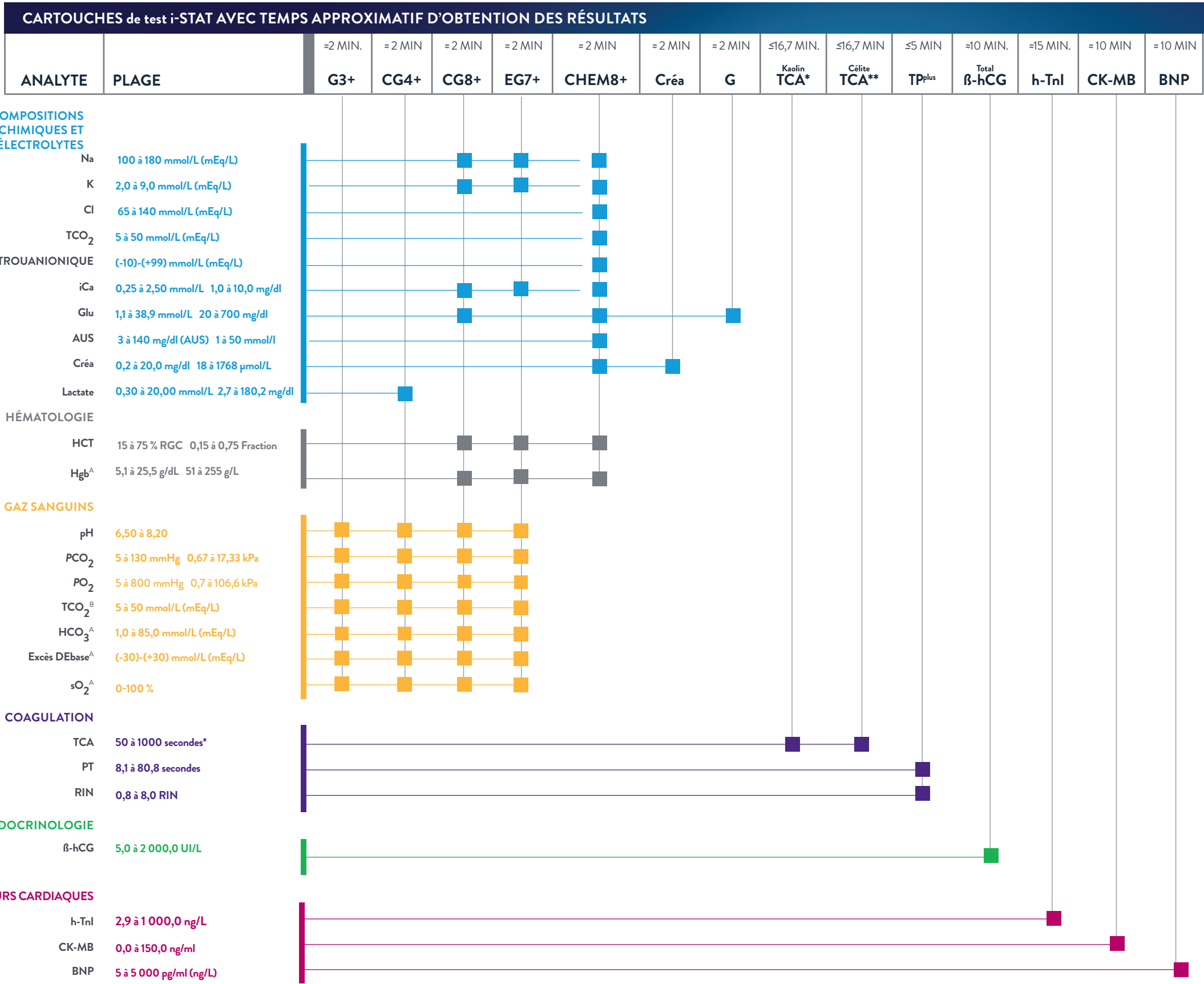

Cartouches de test i-STAT

ANALYSE CLINIQUE À GRANDE ÉCHELLE
DANS UNE CARTOUCHE COMPACTE
À USAGE UNIQUE

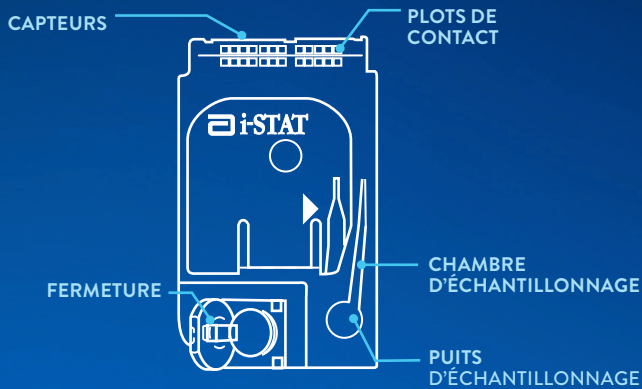

UNE CONCEPTION ET UNE FABRICATION
DE QUALITÉ POUR DES TESTS DESTINÉS
AUX PATIENTS EN LESQUELS VOUS
POUVEZ AVOIR CONFIANCE

Le système *i-STAT* fournit des cartouches configurées
avec des tests pour répondre aux besoins cliniques
courants. Communiquez avec votre représentant *i-STAT*
d'Abbott pour connaître la disponibilité des produits.

←

^A Calculé. ^B Notez que sur la cartouche *CHEM8+*, le TCO₂ est mesuré.

* La plage de 77 à 1 000 secondes (mode PREWRM) a été vérifiée
par des études comparatives de méthodes.

** La plage de 80 à 1 000 secondes a été vérifiée par des études
comparatives de méthodes.

CARTOUCHES	TYPE D'ÉCHANTILLON	TYPE DE TUBE ANTICOAGULANT
Crea, G3+, CG4+, CG8+, EG6+, G, CHEM8+,	A, V, C†	HÉPARINISÉ/SANS ANTICOAGULANT‡
BNP	V, P	EDTA
Kaolin TCA, Célite TCA	A, V	SANS ANTICOAGULANT UNIQUEMENT‡
TPplus	V, FP	SANS ANTICOAGULANT UNIQUEMENT‡
CK-MB, β-hCG, hs-Tnl	V, P	HÉPARINISÉ/SANS ANTICOAGULANT‡

A = SANG TOTAL ARTÉRIEL V = SANG TOTAL VEINEUX C = CAPILLAIRE
FP = SANG TOTAL FRAIS PROVENANT D'UNE PONCTION AU DOIGT P = PLASMA

† Le type d'échantillon capillaire ne s'applique pas à la cartouche *CHEM8+*.

‡ Effectuer le test immédiatement après le prélèvement sur le patient;
consulter le mode d'emploi de la cartouche pour obtenir plus de détails
sur les types d'échantillons approuvés et d'autres renseignements sur
la cartouche et son utilisation.

LES TESTS AVEC LE SYSTÈME i-STAT SONT FACILES À RÉALISER



PORTATIF Facile à manipuler et à transporter là où des tests sont nécessaires

LÉGER < 700 g avec batterie

INTUITIF Navigation simple

DURABLE Fabriqué avec des matériaux résistants aux dommages

PROGRAMMABLE Sélection facile des tests disponibles sur une cartouche donnée et réglages personnalisables en fonction du type d'échantillon, de l'âge et du sexe

VASTE MENU DE TESTS Les cartouches de test à usage unique contenant les tests les plus couramment demandés répondent à un large éventail de besoins cliniques dans divers milieux de soins

RÉSULTATS DE LABORATOIRE PRÉCIS EN QUELQUES MINUTES Réduisez les temps d'attente des résultats de laboratoire en toute confiance

EFFECTUER DES TESTS AUPRÈS DU PATIENT EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES



REMPLISSAGE

Remplissez la cartouche de 2 ou 3 gouttes de sang total frais



EXÉCUTION*

Fermez la cartouche et insérez-la dans l'analyseur i-STAT.



AFFICHAGE

Affichez les résultats en quelques minutes, puis imprimez-les ou transmettez-les†

† Les résultats des tests sont automatiquement transférés dans le DME ou le SIL lorsque l'analyseur i-STAT 1 est placé dans la station de téléchargement ou transmis sans fil avec le modèle i-STAT 1 Wireless.

* L'analyseur i-STAT doit demeurer sur une surface plane et exempte de vibrations pendant les tests et est conçu pour être utilisé uniquement par des professionnels de santé formés.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA NORMALISATION i-STAT



LA NORMALISATION AVEC i-STAT ASSURE L'UNIFORMITÉ DU MENU DE TESTS, DU FONCTIONNEMENT DES UTILISATEURS ET DE LA GESTION DES DONNÉES DANS DIVERS MILIEUX DE SOINS

RÉSULTATS COHÉRENTS ET PRÉCIS COMME EN LABORATOIRE

La reproductibilité et la fiabilité favorisent des soins uniformes et de grande qualité aux patients.

SYSTÈME UNIQUE ET FACILE À UTILISER

Portatif, simple, intuitif; moins de plateformes à superviser.

VASTE MENU DE TESTS SUR UNE SEULE PLATEFORME DE POINT D'INTERVENTION

Exploitez le menu de tests pour tirer le meilleur parti des tests effectués auprès des patients.

FORMATION SIMPLE ET COMPÉTENCE DE L'OPÉRATEUR

Réduction des exigences en matière d'accréditation avec une documentation minimale.

CAPACITÉ SANS FIL ET CONNECTIVITÉ NORMALISÉES

Comptez sur un transfert fiable des résultats vers le DME grâce à une plateforme interfacée unique‡.

COMMANDES ET GESTION DES STOCKS SIMPLIFIÉES

Gagnez en efficacité avec un seul appareil et un nombre réduit de numéros de pièce.

SERVICE ET SOUTIEN CONSTANTS ET FIABLES

Réduisez les temps d'arrêt et améliorez l'efficacité opérationnelle.

RÉDUCTION DES COÛTS

Consolidation des appareils réduisant le nombre de plateformes interfacées et de contrats de service.



‡ Les options de configuration varient; consultez votre représentant i-STAT.

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE



RESSOURCES DE SOUTIEN EN LIGNE

Abbott héberge diverses ressources pour vous aider à utiliser le système *i-STAT* dans votre établissement, notamment des ressources de soutien en ligne pour les utilisateurs et l'assurance de l'aide d'experts en cas de besoin. Visitez la rubrique de soutien du système *i-STAT* à l'adresse www.globalpointofcare.abbott pour découvrir les ressources disponibles, notamment des renseignements sur les produits et les logiciels, des ressources d'apprentissage et de formation, ainsi que les coordonnées des personnes à contacter si vous avez besoin d'aide.

LE SYSTÈME I-STAT OFFRE DES TESTS FIABLES AU POINT D'INTERVENTION

- **DES RÉSULTATS PRÉCIS
COMME EN LABORATOIRE**
Prenez des décisions de traitement en toute confiance

- **VASTE MENU**
Effectuez des tests dans une grande variété de milieux cliniques



- **RÉSULTATS DU TEST EN
QUELQUES MINUTES**
Réduisez les temps d'attente pour les résultats de laboratoire
- **PORTATIF ET FACILE À UTILISER**
Profitez d'un fonctionnement simple et intuitif

i-STAT

POUR SAVOIR COMMENT i-STAT ET ABBOTT PEUVENT CONTRIBUER À AMÉLIORER LES SOINS DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT, VISITEZ LE SITE WWW.GLOBALPOINTOFCARE.ABBOTT OU COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE i-STAT.